

MicroPlant



Nr.:

Frau | Herr

NachsorgePass

Bitte bringen Sie diesen Pass zu jedem Zahnarztbesuch mit!

Ihnen sind MicroPlant-Implantate zur Verbesserung der Funktion und des Haltes Ihrer Unterkieferprothese eingesetzt worden.

Folgende Hinweise sollen dazu beitragen, dass Sie Ihre Prothese möglichst lange und beschwerdefrei tragen können:

1. In den ersten Tagen können Druckstellen auftreten oder es machen sich noch kleine Unstimmigkeiten beim Zusammenbiss (sog. Okklusionsstörungen) bemerkbar. Die Prothese wird dann nicht gleichmäßig belastet und kann sich vorzeitig lösen. Suchen Sie dann sofort Ihren Zahnarzt auf.

2. Implantate bedürfen, wie die eigenen Zähne, auch einer regelmäßigen halbjährlichen / jährlichen Kontrolle durch den Zahnarzt. Gleiches gilt für die tägliche, sorgfältige Pflege der Implantate durch den Patienten.

3. Auf den Implantaten haftende Beläge, sog. Plaques, Speisereste oder Zahnsteinansatz führen zu Entzündungen, die auf den Knochen übergreifen und letztlich den Verlust des Implantates bedingen können.

4. Setzen Sie zum Putzen Ihre Brille auf. Putzen Sie das Zahnfleisch um die Implantate herum zweimal am Tag, nach dem Frühstück und vor dem Zubettgehen, mit einer mittelharten Bürste und Zahnpaste. Führen Sie dazu im Uhrzeigersinn kreisende Bewegungen aus. Alle Beläge auf den Implantaten sollen entfernt sein.

5. Auch die Prothese bedarf einer sorgfältigen Pflege. In der Apotheke erhalten Sie spezielle Prothesenbürsten. Als Reinigungsmittel eignen sich

gut handelsübliche Geschirrspülmittel oder Seife. Für festsitzendere Beläge stehen im Fachhandel (Apotheke, Drogerie) erhältliche Prothesenreinigungsmittel zur Verfügung. Gut geeignet sind spezielle Prothesen-Ultraschallreinigungsgерäte. Auf das Abkochen der Prothese in heißem Wasser (größer 80°C) muss verzichtet werden, Magnet-, O-Ring- und Druckknopfsekundäranker verlieren an Haftkraft.

6. Nehmen Sie nachts, wenn möglich, die Prothese heraus.

7. Kontrollieren Sie in den ersten Wochen hin und wieder mit der Fingerkuppe, ob die aufgeschraubten Halteelemente sich nicht gelockert haben. Sollte dies der Fall sein, so suchen Sie möglichst schnell Ihren Zahnarzt auf. Andernfalls kann es zu Fehlbelastungen der Implantate oder zu Schäden an den Halteelementen kommen. Im übrigen überprüft Ihr Zahnarzt bei jeder Kontrolluntersuchung die Implantate und den Sitz Ihrer Prothese.

Hinweis:

Bei der Durchführung einer Kernspinnresonanztomographie sind die Magnetprimäranker und die Prothese aus dem Mund zu entnehmen. Suchen Sie dazu Ihren Zahnarzt auf.

Wichtig:

Ein gesundes, straffes Zahnfleisch und eine saubere Prothese tragen zum langen Bestand Ihrer Implantate bei.

Implantate eingesetzt am:



Prothese mit Ankern eingesetzt am:



Art der Konstruktion:

UK: Hybridprothese mit 2 – 4 Implantaten

..... LOT-Nr.:

..... LOT-Nr.:

..... LOT-Nr.:

..... LOT-Nr.:

Halteelemente:

Magnet-/O-Ring-/Druckknopfattachment

Implantat Ø:

2,5 mm 3,2 mm

..... LOT-Nr.:

..... LOT-Nr.:

..... LOT-Nr.:

..... LOT-Nr.:

Sonstige verwendete Legierungen:

.....

Kontrolltermine

Kontrolltermin:

Erschienen am:

Stempel:

Kontrolltermin:

Erschienen am:

Stempel:

Kontrolltermin:

Erschienen am:

Stempel:

Kontrolltermin:

Erschienen am:

Stempel:

Kontrolltermin:

Erschienen am:

Stempel:

Kontrolltermin:

Erschienen am:

Stempel:

Kontrolltermin:

Erschienen am:

Stempel:

Kontrolltermin:

Erschienen am:

Stempel:

Kontrolltermin:

Erschienen am:

Stempel: